

Emitent: Techtex SRL
Adresa: Strada 1, Nr 312, Sat Osorhei, jud Bihor
Numar document: IU-FMK-1405
Data emiterii: 22.07.2020
Versiune: 05
Data ultimei versiuni: 05.11.2020



Instructiuni de utilizare

1. Identificare produsului

Cod produs	FMK-1405
Denumire produs	Dr. Albert Safemask KIDS - Masca chirurgicala de unica folosinta pentru copii
Descrierea produsului	Masca chirurgicala de unica folosinta pentru copii - 3 straturi/3 pliuri cu elastic
Clasa de produs	Dispozitiv medical (conform 93/42/EEC, CE clasa 1)
Caracteristici tehnice in conformitate cu SR EN 14683+AC:2019	Tip II

2. Cum se foloseste

Inainte de a intra in contact cu produsul spalati-va mainile cu apa si sapun.

Desfaceți benzile elastice.

Identificati banda metalica de fixare pe nas si orientati masca astfel incat banda sa fie pozitionata in partea de sus a mastii.

Pozitionati masca pe fata astfel incat banda metalica sa fie asezata pe nas si pliurile de pe partea interioara a mastii [spre fața purtătorului] sa fie orientate in sus.

Asezati masca pe fata si fixati benzile/snururile elastice dupa urechi.

Extindeti masca tinand fixa partea superioara a ei si tragand de marginea inferioara, in asa fel incat sa acopere gura si barbia.

Dupa extinderea mastii, apasati si pliati banda metalica pe nas pentru a fixa masca.

3. Cum se inlatura

Inainte de a inlatura masca spalati-va mainile cu apa si sapun.

Evitați să atingeți părțile interioare și exterioare ale măștii, manipularea măștii se va face cu ajutorul benzilor/snururile elastice.

Prindeti cele 2 benzile/snururi elastice si inlaturati masca de pe fata.

Masca folosita se elimina conform recomandarilor aplicabile acestui tip de produs.

Dupa eliminare mastii de pe fata spalati-va mainile cu apa si sapun, inainte de a atinge alte suprafete.

4. Attentionari si recomandari

Se recomanda ca masca să fie schimbată o dată la 4 ore sau ori de câte ori aceasta s-a umezit sau s-a deteriorat.

Nu se recomanda utilizarea mastii intr-un mediu cu nivel scazut de oxigen sau in timpul somnului.

Se recomanda precautie in utilizarea mastii in cazul persoanelor care sufera de astm sau alte afectiuni respiratorii.