

Emitent: Techtex SRL
Adresa: Strada 1, Nr 312, Sat Osorhei, jud Bihor
Numar document: IU-FM-0930B
Data emiterii: 28.01.2021
Versiune: 01
Data ultimei versiuni: 28.01.2021



Instructiuni de utilizare

1. Identificare produsului

Cod produs	FM-0930B
Denumire produs	Dr. Albert Safemask - Masca chirurgicala de unica folosinta
Descrierea produsului	Masca chirurgicala de unica folosinta - 3 straturi/3 pliuri cu benzi elastic
Clasa de produs	Dispozitiv medical (conform 93/42/EEC, CE clasa 1)
Caracteristici tehnice in conformitate cu SR EN 14683+AC:2019	Tip IIR

2. Cum se foloseste

Inainte de a intra in contact cu produsul, spalati-va mainile cu apa si sapun.

Identificati banda metalica de fixare pe nas si orientati masca astfel incat banda sa fie pozitionata in partea de sus a mastii.

Extindeti complet cele doua benzi elastice de pe partile laterale ale masti. Asezati masca pe fata si duceti benzile elastice dupa urechi. Pozitionati masca pe fata, astfel incat marginea pliurilor sa fie orientata in jos.

Extindeti masca in asa fel incat sa acopere gura si barbia.

Dupa extinderea mastii, apasati banda metalica din zona nasului pentru a fixa masca.

3. Cum se inlatura

Evitati să atingeți părțile interioare și exterioare ale măștii, manipularea măștii se va face cu ajutorul benzilor elastice.

Prindeti cele doua benzile elastice si inlaturati masca de pe fata.

Dupa inlaturarea ei aruncati masca folosita.

Dupa aruncarea mastii, spalati-va mainile cu apa si sapun, inainte de a atinge alte suprafete.

4. Atentionari si recomandari

Se recomanda ca masca să fie schimbată o dată la 4 ore sau ori de câte ori aceasta s-a umezit sau s-a deteriorat.

Nu se recomanda utilizarea mastii intr-un mediu cu nivel scazut de oxigen sau in timpul somnului.

Se recomanda precautie in utilizarea mastii in cazul persoanelor care sufera de astm sau alte afectiuni respiratorii.