



FIȘA TEHNICĂ

Denumirea produsului: KLINOSEPT™ DEZINFECTANT RAPID PENTRU SUPRAFETE

Caracteristici fizico-chimice:

ASPECT:	lichid
CULOARE:	transparent
MIROS:	caracteristic, specific de alcool
Ph:	7 ± 0.5
SOLUBILITATE:	completă în orice proporție
VALORI LIMITA (Mg/M3):	Fara valori biologice limita
BIODEGRABILITATE:	> 94% (metoda OECD 301 E)
TERMEN DE VALABILITATE:	3 ani de la data fabricației

Domeniul de aplicare: Domeniul sanitar (medical), cabinete medicină dentară, veterinar, colectivități (azile, sali fitness etc.), instituții, industria farmaceutică, saloane infrumusețare/cosmetică, restaurante, hoteluri, transporturi. Dezinfectant uz profesional pentru curatarea și dezinfecția suprafețelor din spații private și zone de sănătate publică. Se poate utiliza și pentru curatarea și dezinfectarea instrumentarului.

Utilizarea substanței/preparatului: DEZINFECTANT RAPID PENTRU SUPRAFETE este un produs gata preparat, fără aldehide, pentru dezinfecția și curățarea rapidă prin pulverizare și ștergere a obiectelor medicale, cum ar fi mese de operație, paturi mobile, lămpi de examinare cu stativ mobil (4 roți) și scaune stomatologice. Pentru dezinfecția și curățarea rapidă prin pulverizare și ștergere a dispozitivelor medicale neinvazive cum ar fi: bancuri de laborator, scaunele de tratament, suprafețele unitului, cuvele/tăvile pentru instrumentar, piesele de mână și contrunghi, mânerurile de la lămpile de examinare, instrumentarul din oțel, aluminiu, cupru, silicon și cauciuc.

Tip produs biocid: GRUPA PRINCIPALA I, TP 2

Compoziția chimică la 100 ml produs :

Substanța activă: 85% ethanol, CAS:64-17-5; CE:200-578-6,

Alte ingrediente: parfum, colorant și apă

Mod de utilizare: Umeziți complet suprafețele și obiectele ce vor fi dezinfectate și lăsați să acționeze. Respectați timpii de expunere. Dacă este necesar, ștergeți suprafețele și obiectele cu o lavetă curată de unică folosință. Utilizați numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Testați înainte de utilizare pe materiale sensibile, prin aplicarea pe o zonă mică puțin vizibilă. O cantitate de 16-20 ml/m² este suficientă pentru a umezi suprafețele netede în condiții normale de temperatură 20-23°C.

Activitate biocida și standarde:

KLINOSEPT™ DEZINFECTANT SUPRAFETE					
Activitate biocida	Standard	Condiții testare	Organism testat	Concentrație	Timp contact
BACTERICIDA	SR EN 13727	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Enterococcus hirae ATCC 10541 Escherichia coli ATCC 10536	ca atare	30 secunde
FUNGICIDA	SR EN 13624	Curatenie	Aspergillus niger ATCC 16404	ca atare	60 secunde
LEVURICIDA	SR EN 13624	Curatenie	Candida albicans NCPF 3179	ca atare	60 secunde
LEVURICIDA	SR EN 13697	Murdarie	Candida albicans NCPF 3179	ca atare	60 secunde
MICOBACTERICIDA	SR EN 14348	Curatenie	Mycobacterium avium ATCC 15769 Mycobacterium terrae ATCC 15755	ca atare	60 secunde
TUBERCULOCIDA	SR EN 14476		Poliovirus type 1		
VIRUCIDA		Murdarie	Murine Norovirus Adenovirus type 5	ca atare	3 minute

Klintensiv®

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexandriei 544, Bragadiru, Ilfov
Tel: 0749.550.140
Fax: 021/44.81.487
Email: office@klintensiv.com
Web: www.klintensiv.com

Indicații de utilizare:

Domeniul de utilizare - unitați sanitare				
Metoda de	Concentrație	Utilizare	Eficacitate biocida	Țimp
Prin pulverizare, stergere, imersie	Nediluat 100% - produs gata de utilizare	Suprafețe	Bactericid, fungicid, leverucid, micobactericid, tuberculocid	60 secunde
			Virucid	3 minute
Domeniul de utilizare - industrial, casnic				
Prin pulverizare, stergere, imersie	Nediluat 100% - produs gata de utilizare	Suprafețe	Bactericid, fungicid, leverucid, micobactericid, tuberculocid	60 secunde
			Virucid	3 minute

Ambalare: 100/150/200/250/500/750/1000/5000ml, 2 litri, 3 litri, 10 litri, 20 litri, 50 litri, 100 litri, 200 litri, 1000 litri.

Transport, livrare, depozitare: KLINTENSIV® DEZINFECTANT SUPRAFETE se depozitează în spații închise, curate, bine aerisite, la temperaturi între +5°C la +30°C. Fiecare lot de livrare va fi însoțit de documentul de certificare a calității întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv declarația de conformitate întocmită pe baza specificațiilor tehnice și a buletinelor de analiză și avizul sanitar.

Precauțiuni de utilizare:

Fraze de pericol (H):

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili



GHS02

Fraze de precauție (P):

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P233 Păstrați recipientul închis etanș.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391 Colectați scurgerile de produs

P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

P501 Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/nationale/ internațional (a se specifica).