

Ediție/Revizie:
01/04

Cod document:
FT-01-155

Data ultimei revizii:
06.02.2024

Cod produs:
B155-RO

❖ Avantaje

- ✓ Detergent dezinfectant de nivel înalt cu acțiune rapidă împotriva microorganismelor
- ✓ Acționează împotriva bacteriilor, fungilor și virusurilor prin mecanism de oxidare, inclusiv la temperaturi scăzute
- ✓ Stabil din punct de vedere chimic
- ✓ Acționează prin mecanism de oxidare celulară
- ✓ Nu provoacă iritații ale mucoasei bucale, nazale, oculare dacă este utilizat conform indicațiilor
- ✓ Este economic și ușor de utilizat
- ✓ Nu necesită clătire după utilizare
- ✓ Este biodegradabil

❖ Utilizare

Dezinfectarea și curățarea suprafețelor din unități sanitare, laboratoare medicale, instituții publice (școli, azile de bătrâni, hoteluri, săli de sport, săli de conferință, aeroporturi, gări, hale industriale, etc) precum și cele din domeniul casnic. Suprafețe care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale.

Dezinfectarea și curățarea instrumentarului medical/ dispozitivelor medicale.

Dezinfectarea și curățarea (spălarea) materialelor textile.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se prepară sub formă de diluție de minim 0,5% m/v pentru soluția gata de lucru și poate fi utilizat pe suprafețe curate/ murdare, iar acesta prezintă acțiune rapidă.

Produsul este însoțit de lingură dozatoare. 1 lingură plină conține 17g produs Oxoklin powder.

Exemplu mod de preparare: 5g dezinfectant + 1L apă potabilă/ distilată, pentru a obține 1L soluție gata de lucru. Soluția se utilizează numai după:

- dizolvarea totală a produsului în apă, iar pentru dizolvarea rapidă se recomandă ca apă să fie caldă (30°C).
- un timp de așteptare de 15 minute pentru generarea in situ a acidului peracetic după dizolvarea ingredientelor.

Soluția preparată este păstrată în recipiente închise, ferită de acțiunea directă a luminii (naturale/ artificiale), la temperatura camerei și utilizată în maxim 8 de ore de la preparare.

Tehnici de aplicare:

- se folosește un pulverizator manual
- laveta curată din material sintetic (preferabil poliester/ polietilenă)
- imersie în cuvă/ recipient cu lichid

Se aplică pe toate suprafețele, dezinfectantul OXOKLIN powder, sub formă de soluție gata de lucru 0,5% -5% cu acțiune bactericidă, levuricidă, fungicidă, micobactericidă și virucidă, respectând timpii de contact specificați.

Klintensiv

Se aplică direct pe suprafața ce trebuie tratată sau pe o lavetă curată. Ștergeți bine suprafața ce se dorește a fi tratată. Nu necesită clătire.

Instrumentarul curățat și uscat este plasat în cuva cu soluție 2% m/v (bactericid, fungicid, virucid), trebuie acoperit total de lichid. Timp de contact minim 5 minute. După dezinfectare, instrumentarul este clătit cu apă / apă sterilă (în funcție de tipul de dezinfectare și protocoalele interne ale unității). Soluția din cuva de dezinfectare poate fi refolosită pentru maxim 5 seturi complete de instrumentar sau în 8 de ore de la preparare. Se recomandă utilizarea unei cuve opace din material plastic. După timpul de contact pentru dezinfectare, instrumentarul este clătit cu apă / apă sterilă.

Pentru dezinfectarea textilelor:

- Se prepară o soluție de 2% m/v în care se imersează materialele textile în totalitate timp de 15 minute.
- Pentru spălarea și dezinfectarea automată a materialelor textile se utilizează mașinile automate. Pentru o mașină de spălat cu capacitatea de 6-8kg textile se introduc 40-50g pulbere produs Oxoklin powder. Tipul pentru spălare și dezinfectare este de 60minute. Rație de haine:soluție = 1:4. Temperatura este stabilită în funcție de recomandările tipului de textile.
- Pentru textile cu grad ridicat de murdărie se recomandă o imersare prespălare în soluție 1-2% m/v Oxoklin powder, timp de 15minute, apoi spălarea automată.

Recomandări de utilizare:

În timpul utilizării, trebuie să vă echipați corespunzător. Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor și a feței, vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Compatibilitate cu materiale: oțel inoxidabil, PVC, polipropilenă, polietilenă, silicon, ceramică, gresie, sticlă, cauciuc, crom, cupru, zinc, suprafețe acoperite prin cromare/ vopsire, tarket/ linoleum.

Nu corodează aluminiul, oțelul inoxul, oțelul cositorit, materialele plastice precum teflonul, PE, PP și PS. Corodează fierul. Nu este recomandat pentru utilizarea pe materiale din cupru.

Nu se recomandă utilizarea pentru dezinfectarea instrumentarului din crom și nichel cu urme vizibile de deteriorare/ uzură.

Tip produs biocid: grupa principală 1, PT 2

Categorie de utilizare: industriali, profesionali, populație.

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bacterică EN 13727	0,4%	5 minute
Bacterică EN 13697	0,2%	5 minute
Levurică EN 13697	0,4%	15 minute
Fungică EN 13697	5%	15 minute
Levurică EN 13624	0,3%	5 minute
Fungică EN 13624	3%	5 minute
Virucidă EN 14476 pe tulpini anvelopate	0,5%	5 minute
Virucidă EN 14476	0,5%	30 minute

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Micobactericid / Tuberculocid EN 14348	0,5%	15 minute
Bactericid EN 13727 MRSA	0,4%	5 minute
Bactericidă EN 16615	0,25%	5 minute
Bactericidă EN 1276	0,4%	5 minute
Levuricidă EN 1650	0,3%	5 minute
Fungicidă EN 1650	5%	20 minute
Bactericidă EN 17387	0,5%	5 minute
Sporicidă EN 17126 + <i>C.diff</i>	5%	30 minute
Bactericidă EN 14561	0,8%	5 minute
Fungicidă EN 14562	3%	2 minute
Levuricidă EN 16615	0,8%	5 minute
Virucidă limitată EN 14476 (Adeno virus, MNV)	5%	5 minute
Virucidă EN 16777	2%	5 minute
Virucidă EN 17111	2%	5 minute

❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 14% Acid peracetic generat in situ (15% TAED și 40% Percarbonat de sodiu), CAS: 79-21-0; 2,4% Compuși cuaternari de amoniu clorurați, benzyl-C12-C14-alchildimetil, CAS: 85409-22-9, CE: 287-089-1.
- Alte ingrediente: <5% surfactanți nonionici, agenți anticorozivi.
- Descriere: pulbere albă.
- pH soluție 0,5%: $9,5 \pm 0,5$
- Solubilitate: solubil în apă

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ SDS). Pentru a accesa FDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 4 ani de la data fabricației. Produsul nu se contaminează timp de 6 luni de zile de la deschiderea recipientului. Produsul va fi păstrat bine închis, în ambalajul original, loc uscat și temperaturi între 5 și 30°C. După deschiderea recipientului se recomandă închiderea atentă. În vederea dozării produsului pentru pregătirea soluțiilor de lucru se oferă linguriță dozatoare de 25mL (conține 17g produs). Recipientul gol nu se va reutiliza!

Eficacitatea produsului este în acord cu cerințele standardului ISO 14885:2022.

Ambalajul conține cel puțin 30% plastic reciclat. Ambalajul se reciclează la materiale plastice, dar după curățarea totală prin spălare cu apă.



❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498.

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.