

Ediție/Revizie:
01/01

Cod document:
FT-01-141

Data ultimei revizii:
07.06.2024

Cod produs:
B141-RO

❖ Avantaje

- ✓ Peste 98% ingrediente biodegradabile
- ✓ Nu conține coloranți, nu pătează, nu decolorează
- ✓ Eficiență demonstrată inclusiv în condiții de murdărie
- ✓ Nu spumează
- ✓ Nu conține: aldehide, fenoli, clor, amine, peroxizi, conservanți, surfactanți
- ✓ Prezintă capacitate bună de curățare și degresare
- ✓ Conform testului Virucid EN 14476 produsul protejează împotriva tulpinilor acoperite precum: Coronavirus; Enterovirus; Virusul Hepatitei A, B (HBV) și C (HBC); Herpesviridae; Virusul Hepatitei Delta (HDV); HIV; HTLV; Parvovirus B19; Influenza virus; Rotavirus; Paramyxoviridae; Measles virus; Rabies virus; Poxviridae, Calciviridae; Astrovirus; Rhinovirus; Rubella virus; Papilloma virus; Polyomavirus.

❖ Utilizare

Dezinfectarea suprafețelor în domeniul medical, public și privat.

Produsul poate fi utilizat în domeniul stomatologic pentru dezinfectarea suprafețelor și amprentelor dentare din diferite tipuri de materiale.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se utilizează ca atare, nu se diluează și nu necesită clătire (se evaporă). Produsul se utilizează pe suprafețe curate/ murdare, iar acesta prezintă acțiune rapidă.

Tehnici de aplicare:

- pulverizator manual,
- ștergere cu lavetă

Pentru dezinfecția suprafețelor se folosește o cantitate suficientă pentru acoperirea totală a acestora (4-8ml acoperă 1m²), prin tehnicile de aplicare direct pe suprafețe. După aplicarea unor cantități mari de produs, prin tehnica dezinfectării suprafețelor cu pulverizator, se recomandă ventilarea/ aerisirea încăperilor.

Produsul este ideal utilizării: în spitale, clinici, laboratoare, policlinici, cabinete medicale, ambulanțe, inclusiv zonele de birou ale acestora sau zonele de cantină, dar nu pe alimente/ contact direct cu acestea. Este ideal pentru utilizarea pe suprafețe intens accesate de oameni cu un risc mare de contaminare (spații de triaj/ așteptare, vestiare, camere pentru consultații, ambulanțe).

Dezinfectează rapid și eficient toate tipurile de materiale de amprente dentare fără a modifica forma și structura acestora.

Produsul este compatibil cu suprafețe metalice neacoperite (aluminiu, cupru, zinc, crom, bronz, argint, aur, inox medical/ alimentar/ 314L/ 316L), metalice acoperite (cromate, vopsea, galvanizate, email, rășini), plastice de diferite tipuri (PP, PE, HDPE, ș.a.), cauciuc, silicon, teflon, linoleum, lemn, compozite minerale (gresie, faianță, marmură, beton, ș.a.).

A se evita aplicarea produsului direct pe alimente/ produse comestibile (gust puternic amar).

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bactericidă EN 13727	70%	30 secunde
Levuricidă EN 13697	100%	30 secunde
Fungicidă EN 13697	100%	1 minut
Micobactericidă/ Tuberculocidă EN 14348	80%	1 minut
Levuricidă EN 13624	80%	30 secunde
Fungicidă EN 13624	80%	90 secunde
Virucidă EN 14476	80%	2 minute
Bactericidă EN 13727 (MRSA)	80%	30 secunde
Bactericidă/ Levuricidă EN 16615	100%	3 minute
Bactericidă EN 16397	100%	30 secunde
Bactericidă EN 1276	100%	30 secunde
Levuricidă EN 1650	100%	30 secunde
Fungicidă EN 1650	100%	90 secunde
Virucidă pe încapsulați EN 14476	80%	45 secunde

❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 36% m/m Etanol, nr. CAS: 64-17-5, CE: 200-578-6; 24% m/m Izopropanol CAS: 67-63-0, CE: 200-661-7; 0,5% m/m Digluconat de clorhexidină CAS: 18472-51-0, CE: 242-254-0.
- Alte ingrediente: apă, agent de denaturare.
- Descriere: lichid incolor, cu miros specific de alcool
- pH = 7,5 ± 0,5
- Solubil în apă

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 6 luni de la deschidere.

Produsul a fost testat și îndeplinește cerințele standardului ISO 14885:2022.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498.

