

ANIOSPRAY QUICK

Dezinfectant pulverizabil

INDICAȚII:

ANIOSPRAY QUICK este un dezinfectant rapid dispozitive medicale curatate în prealabil și rezistente la alcool.

MOD DE UTILIZARE:

Produs gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare. **ANIOSPRAY QUICK** poate fi utilizat cu un pulverizator manual.

Pulverizați uniform pentru obținerea unui film antimicrobian uniform. Timp de contact minim 30 de secunde.



COMPOZIȚIE CALITATIVĂ:

Soluție hidroalcoolică (etanol 55%)

Propionate de N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium

PROPRIETĂȚI TEHNOLOGICE:

Produs gata de utilizare; Soluție incoloră, fără miros; Densitatea 0,9 ; pH – ul produsului la +20° C ~ 5,5;

Stocare: între 5 - 25 °C

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE:

ANIOSPRAY QUICK este un produs fabricat conform următoarelor norme de eficacitate antimicrobiană:

Bactericid:

SR EN 1040, SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 14561, inclusiv MRSA – 30 de secunde

Micobactericid

SR EN 14348 ; SR EN 14563 – *Micobacterium terrae* – 30 de secunde

SR EN 14348 ; SR EN 14563 – *Micobacterium avium* – 5 minute

Fungicid

SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - *Candida albicans* – 30 de secunde

SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - *Aspergillus niger* – 5 minute

Virucid : HIV, HBV, HCV, Adenovirus, Vaccinia virus, Herpes virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus H1N1 – 30 de secunde

PRECAUȚII LA UTILIZARE:

Citiți fișa de securitate și eticheta. „Inflamabil” - respectați precauțiile de utilizare stabilite de Directiva Europeană 99/45/CE.

APARAT DE PULVERIZARE: Pulverizator manual.

Produs de uz extern. Inflamabil. Nu trebuie depozitat sau pulverizat în apropierea surselor de foc. A nu se fuma. În cazul contactului cu ochii clătiți imediat cu multă apă. În caz de ingerare consultați de urgență un medic, arătându-i eticheta. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

PREZENTARE: Cutie de 12 flacoane de 1L; Cutie de 4 bidoane de 5 L.

ANIOSPRAY QUICK

Mod de utilizare

Este recomandat pentru dezinfectia rapida a suprafetelor dispozitivelor medicale curatate in prealabil si rezistente la alcool.

ANIOSPRAY QUICK este o solutie gata de utilizare care contine alcool.

Pentru uz profesional.

Pulverizati zonele de tratat pana la umectarea lor in totalitate.

Respectati timpii de contact indicati pentru activitatea antimicrobiana solicitata.

ANIOSPRAY QUICK

REGLEMENTARI SI INFORMATII GENERALE

ANIOSPRAY QUICK este conceput, produs si controlat de Laboratoires ANIOS, certificat de AFAQ cu numarul 1995/3723, in accord cu Sistemul de Asigurare a Calitatii ISO 9001.

ANIOSPRAY QUICK beneficiaza de marcajul CE 0459 cu privire la dispozitivele medicale, in conformitate cu Directiva 93/42/CE, clasa a II a.

ANIOSPRAY QUICK este etichetat conform directivei 99/45/CE cu adaptarile sale, cu privire la clasificare, ambalare si etichetare a preparatelor periculoase.

ANIOSPRAY QUICK

STABILITE SI CONDITII DE CONSERVARE

Produs gata de utilizare :

- stocare intre +5°C si +25°C.
- stabilitate :
- recipient nedeschis : 3 ani de la data fabricatiei (precizat pe eticheta).
- recipient deschis : 3 ani de la data fabricatiei in conditiile pastrarii in flacon inchis cu pulverizator manual

ANIOSPRAY QUICK

MICROBIOLOGIE

Tablou de sinteza a activitatii antimicrobiene:

STUDII	REZULTATELE SOLUTIEI GATA DE UTILIZARE	
	TIMPUL DE CONTACT	
<u>ACTIVITATE BACTERICIDA</u>		
EN 1040		30 sec.
EN 13727		30 sec.
EN 1276		30 sec.
EN 14561		30 sec.
MRSA - EN 14561		30 sec.
<u>ACTIVITATE MICOBACTERICIDA</u>		
EN 14348 : Mycobacterium terrae		30 sec.
Mycobacterium avium		5 min.
EN 14563 : Mycobacterium terrae		30 sec.
Mycobacterium avium		5 min.
<u>ACTIVITATE FUNGICIDA</u>		
EN 1275		
- Candida albicans		30 sec.
- Aspergillus niger		5 min.
EN 13624		
- Candida albicans		30 sec.
- Aspergillus niger		5 min.
EN 14562		
- Candida albicans		30 sec.
- Aspergillus niger		5 min.
Tricophyton mentagrophytes - EN 14562		30 sec.
<u>ACTIVITATE VIRUCIDA</u>		
Adenovirus		30 sec.
HIV – 1		30 sec.
PRV (activitate impotriva HBV		30 sec.
BVDV (virus model al hepatitei C)		30 sec.
Herpes virus – HSV 1		30 sec.
Coronavirus		30 sec.
Rotavirus		30 sec.
Influenza virus H1N1 – EN 14476		30 sec.
Vaccinia virus – EN 14476		30 sec.

ANIOSPRAY QUICK

Proiect de eticheta



INDICAȚII:

ANIOSPRAY QUICK este un dezinfectant rapid dispozitive medicale curatate în prealabil și rezistente la alcool.

MOD DE UTILIZARE:

Produs gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare. **ANIOSPRAY QUICK** poate fi utilizat cu un pulverizator manual. Pulverizați uniform pentru obținerea unui film antimicrobian uniform. Timp de contact minim 30 de secunde.

COMPOZIȚIE CALITATIVĂ: Soluție hidroalcoolică (etanol 55%); Propionate de N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium (0,1%)

PROPRIETĂȚI TEHNOLOGICE: Produs gata de utilizare; Soluție incoloră, fără miros; Densitatea 0,9 ; pH – al produsului la +20° C ~ 5,5; Stocare: între 5 - 25 °C

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE:

ANIOSPRAY QUICK este un produs fabricat conform următoarelor norme de eficacitate antimicrobiană:

Bactericid:

SR EN 1040, SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 14561, inclusiv MRSA – 30 de secunde

Micobactericid

SR EN 14348 ; SR EN 14563 – Micobacterium terrae – 30 de secunde

SR EN 14348 ; SR EN 14563 – Micobacterium avium – 5 minute

Fungicid

SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - Candida albicans – 30 de secunde

SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - Aspergillus niger – 5 minute

Virucid : HIV, HBV, HCV, Adenovirus, Vaccinia virus, Herpes virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus H1N1 – 30 de secunde

PRECAUȚII LA UTILIZARE:

Clasificare conform: Directiva numită < Toate pregătirile > 1999/45/CE și adaptările sale. Regulament (CE) nr. 1272/2008 (CLP) și adaptările sale (Regulament (CE) nr. 790/2009).

Clasificarea Produsului : R 10 Inflamabil. S 16 A se păstra departe de orice flacăra sau sursa de scântei - Fumatul interzis. S 51 A se utiliza numai în locuri bine ventilate. S 23 Nu inspira.i direct aerosolul rezultat în urma pulverizării. S 37 A se purta manusi corespunzătoare. S 26 În cazul contactului cu ochii, spala.i imediat cu multă apă și consulta.i medicul. S 46 În caz de înghi.ire, a se consulta imediat medicul și a i se arata ambalajul sau eticheta. S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.S 60 Acest produs și ambalajul sau se vor depozita ca un deșeu periculos.R 11 Foarte inflamabil.R 36 Iritant pentru ochi. R 67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețea.

APARAT DE PULVERIZARE: Pulverizator manual. Produs de uz extern. Inflamabil. Nu trebuie depozitat sau pulverizat în apropierea surselor de foc. A nu se fuma. În cazul contactului cu ochii clătiți imediat cu multă apă. În caz de ingerare consultați de urgență un medic, arătându-i eticheta. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

PREZENTARE: Cutie de 12 flacoane de 1l; Cutie de 4 bidoane de 5 l.

Producator : Laboratoires Anios Franta

Distribuitor autorizat: Unimedik Impex SRL