



MEDISEPT

Dezinfectarea perfectă



Viruton® Pulver

Pulbere pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor, endoscoapelor, incubatoarelor și a altor suprafețe ale dispozitivelor medicale

Viruton® Pulver este un preparat modern pentru curățarea și dezinfectarea la nivel înalt a dispozitivelor medicale invazive și non-invazive. Este recomandat pentru instrumente chirurgicale și dentare și pentru toate tipurile de endoscoape, sonde chirurgicale, tuburi de ventilare și alte echipamente anestezice.

Caracteristicile produsului:

- Spălare activă datorită prezenței a 4 enzime.
- Pentru dispozitivele de curățare ultrasonice și endoscoape.
- Dezinfectare la nivel înalt (efect sporicid).
- Nu produce praf.
- Nu necesită un activator.
- Proprietăți anticorozive și toleranță ridicată a materialului - Opinia Centrului Chirmed.
- Concentrație de la 1% în 10 min.

Beneficiile utilizatorului:

- Eficacitate garantată și siguranță de utilizare.
- Reducerea semnificativă a riscului de infecție.
- Îndepărtează eficient murdăria organică uscată.
- Viteza și comoditatea utilizării.



Non - dusting



High-level
disinfection



Active
washing



Concentration
from 1%
in 10 min.

Mod de aplicare:

Viruton® Pulver este un preparat modern pentru curățarea și dezinfectarea la nivel înalt a dispozitivelor medicale invazive și non-invazive. Este recomandat pentru instrumente chirurgicale și dentare și pentru toate tipurile de endoscoape, sonde chirurgicale, tuburi de ventilare și alte echipamente anestezice. Poate fi folosit și pentru dezinfectarea suprafețelor echipamentelor medicale, cum ar fi incubatoarele. Este recomandat pentru dezinfectarea manuală, în dispozitivele de curățare cu ultrasunete, dispozitive de spălat automate și băi de curățare a endoscopului. Nu necesită un activator. Soluția necontaminată este stabilă până la 36 de ore. Formula inovatoare conține patru enzime (protează, lipază, amilază și manază) responsabile de îndepărtarea contaminanților organici, cum ar fi sângele, proteinele, grăsimile și secrețiile. Compoziția agenților tensioactivi împiedică depunerea pulberii și garantează proprietăți excelente de spălare.

Eficacitate	EN 14885	10 min.	Timp 30 min.	60 min.
Bacterii (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA)	EN 13727		0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%	
	EN 13697		0,5%	
Ciuperci (C. albicans)	EN 13624		0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%	
Ciuperci (A. Brasiliensis)	EN 13624	1%		0,5%
	EN 14562	2%		
Mycobacteria tuberculosis (M. terrae)	EN 14348		0,5%*	
	EN 14563			0,5%
M. tuberculosis (M. terrae, M. avium)	EN 14563	1%	1%	
Virusuri (Polio, Adeno, Noro, HBV, HIV, HCV, Rota, SARS, gripă, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	2%	1%	
Spors (C. difficile)	EN 13704	1%*, 2%	0,5%	
Spors (B. subtilis)	EN 13704	1%*	0,5%	

*condiții de curățenie

Instrucțiuni cu privire la utilizare:

Consultați tabelul de distribuire și măsurați cantitatea necesară de apă curentă. Adăugați cantitatea corectă de pulbere, folosind dispozitivul de măsurare atașat, agitați soluția. Acoperiți recipientul și lăsați-l 15 minute pentru a se activa. Agitați din nou soluția ulterior. Utilizarea apei calde va accelera dizolvarea pulberii. Cantități mici de reziduuri pe fundul recipientului asigură stabilitatea soluției în timp. Schimbați soluția zilnic. Benzi de test disponibile pentru a confirma activitatea soluției de lucru. Etanșați strâns recipientul după utilizare. Nu scufundați instrumente umede în pulbere. Nu folosiți cu instrumente de unică folosință. Urmați instrucțiunile producătorului de instrumente și echipamente. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat. A se păstra la temperaturi sub 25 ° C. Protejați împotriva umidității. **Curățarea și dezinfectarea instrumentelor și endoscoapelor:** Scufundați instrumentele în soluție, acoperind bine toate componentele și orificiile. După un timp de dezinfectare definit, clătiți instrumentele cu apă potabilă (de preferință apă distilată sterilă sau apă demineralizată). Nu depășiți timpul de dezinfectare recomandat. Produsul nu este destinat pentru a fi folosit cu instrumente din aluminiu, cupru și alamă. Poate fi folosit pentru unelte cromate și placate cu nichel. **Curățarea suprafeței și dezinfectarea:** Pulverizați suprafețele echipamentului medical cu soluție de 0,5% sau ștergeți-le cu o cârpă și lăsați să acționeze 30 de minute. **Spălarea și dezinfectarea incubatoarelor:** instrucțiuni detaliate disponibile.

Dozaj: Recipient	Concentrație	Cantitatea de apă	Cantitatea de pulbere	Concentrație	Cantitatea de apă	Cantitatea de pulbere
1 l	1%	990 ml	10 g	2%	980 ml	20 g
2 l	1%	1980 ml	20 g	2%	1960 ml	40 g
3 l	1%	2970 ml	30 g	2%	2940 ml	60 g

Benzi de testare



Ingrediente:

percarbonat de sodiu (CAS: 15630-89-4), TAED (CAS: 10543-57-4), enzime, acizi organici, tensioactivi neionici, inhibitori de coroziune

Unități de ambalare:

1 kg cu dispozitiv de măsurare,
5 kg cu dispozitiv de măsurare



Dispozitiv medical clasa II în sensul Legii cu privire la dispozitivele medicale. Conceput pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale non-invazive.

Fișa cu date de securitate și fișa cu date de securitate a componentelor este disponibilă la www.medisep.pl

CE 2274