

Detergent-Dezinfectant tri-enzimazic liquid

Dezinfecția și curățarea instrumentelor medicale și endoscoapelor. *ANIOSYME XL3*
Formula brevetată (asociere de 3 principii active și un agent de suprafață neionic)
Putere mare de curățare.

Spălare poli enzimatică de înaltă performanță Nu
corodează materialele

Eficacitate antimicrobiană în 5 minute
(bactericid, fungicid, virucid)

**INDICAȚII**

- Curățarea eficientă și predezinfecția instrumentelor medico-chirurgicale, a dispozitivelor medicale și a materialului endoscopic.
- Spălare în bai cu ultrasunete.
- Colectarea de instrumente murdare

MOD DE UTILIZARE:

- ANIOSYME XL3 se utilizează diluat la 0,5% (adică 25 ml la 5 litri de apă caldă sau rece)
1% (adică 50 ml la 5 litri de apă caldă sau rece)
2% (adică 100 ml la 5 litri de apă caldă sau rece)
- Se imersează în totalitate dispozitivul medical
- Se perie dacă este necesar.
- Se clătește foarte bine.

COMPOZIȚIE CALITATIVĂ:

- Carbonat de amoniu cuaternar
- Amfoter și tensioactivi neionici
- Un complex de enzime (proteaze, mananaze, amilaze)
- Agenți stabilizatori.
- Parfum, colorant, excipienți.

PROPRIETĂȚI TEHNOLOGICE:

- Soluție limpede de culoare portocalie.
- Parfumat.
- PH-ul produsului pur : neutru (pH aprox. 8)
- PH-ul în diluție de 0,5% : neutru (pH 8)
- Solubil în apă rece sau caldă.

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE:

ANIOSYME XL3 este un produs conform următoarelor Norme AFNOR și europene de eficacitate antimicrobiană:

- Bactericid: EN 1040-**0.1% - 5 min**; EN 13727;MRSA; EN 14561 – **0.5% - 5 min** (condiții de murdărie)
- Levuricid: EN 1275-**0.25% - 5 min**; EN 13624-**0.4% - 5 min**; EN 14562 – **0.5% - 5 min** (condiții de murdărie)
- Tuberculocid : EN 14348 (M. Terrae);– **0.5% - 60 min., 1% - 30 min. sau 2% - 15min.** (condiții de murdărie)
- Tuberculocid :EN 14563 (M. Terrae) ;– **0.5% - 60 min., 0,5% - 30 min. sau 1% - 15min.** (condiții de murdărie)
- Virucid: EN 14476 - PRV (virus model HBV); EN 14476 - BVDV (virus model HCV); EN 14476 - Herpes virus; EN 14476 - Vaccinia virus; EN 14476- HIV – **0.5% - 5 min** (condiții de murdărie), EN 17111 - Vaccinia virus- **0.5% - 15 min** (condiții de murdărie)

PRECAUȚII LA UTILIZARE:

Produs de uz extern. A nu se înghiți. Iritant pentru ochi și piele. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. În caz de contact cu ochii spălați imediat cu multă apă și consultați un specialist. Purtați mănuși de protecție corespunzătoare.

PREZENTARE:

- carton de 4 bidoane de 5 litri cu pompa și dozator de 25 ml.
- carton de 12 bidoane de 1 litri cu pompa și dozator de 25 ml.