

ANIOS OXY'FLOOR

Dezinfectant detergent de nivel inalt pentru suprafete prin stergere si pulverizare



Caracteristici:


- Pulbere alba fara miros
- Actiune simultana de curatare si dezinfectie
- Asigura dezinfectia de nivel inalt a suprafetelor
- Pulbere ce eliberează acid peracetic
- Pulbere alba cu granulometrie redusa
- Pulbere higroscopica – a se feri de umiditate
- Stabilitatea băii de lucru : 24 ore
- pH- ul soluției diluate(0,5%): aprox. 9,3

Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete :
Spectru total antimicrobian la 0,5 % in 60 minute, 1% 30 minute, 2% 15 minute (bactericid, fungicid, micobactericid (M. terrae, M. avium), virucid (Enterovirus Polio, Adenovirus, Vaccinia virus, Norovirus, Rotavirus, BVDV (HCV)- PRV (HBV), sporicid

- Dozaj recomandat : 25 g la 5 litri de apa pentru dezinfectia de nivel inalt

NU CONTINE PERBORAT

Dezinfectia de nivel inalt
Dozaj recomandat : 25 g → 5l apa

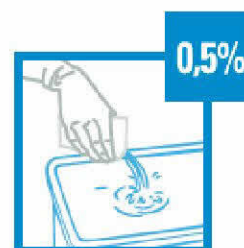

ANIOS OXY'FLOOR

Mod de utilizare :

Dezinfectia de nivel inalt a suprafetelor :

1. Umpleti un recipient cu 5 litri de apa calduta. Dilutie 0,5 %. Varsati 25 grame de ANIOS OXY FLOOR in recipient.
2. Dupa efectuarea unei maturari umede aplicati solutia respectand schema de lucru – din spatele incaperii spre iesire.
3. Inlocuiti instrumentul cu care se aplica solutia de lucru precum si solutia de lucru ori de cate ori este necesar.



COMPOZITIE CALITATIVA:

Pudra pe baza de percarbonat de sodiu, tétra acétyl – éthylèn diamina si clorura de N-alkyl (C12-14) – N – benzyl - N, N-diméthylammonium.

Producere instantanee de acid peracetic prin diluare in apa.

Compozitie in substante active la 100 g solutie activa (0,5 %)

Acid peracetic generat in situ : 750 ppm

Clorura de N-alkyl (C12-14) – N–benzyl - N, N-diméthylammonium – 0,012%

PRECAUTII LA UTILIZARE:

Respectati instructiunile de folosire (conform Directivei 99/45/EC). Inainte de utilizare cititi eticheta produsului.

CONDITIONARE:

- plic de 25 g
- recipient de 1 kg

PROPRIETATI MICROBIOLOGICE:

BACTERICID

EN 1040 - 0, 05 % 5 min.

EN 13697 - 0, 5 % 5 min.

MICOBACTERICID

EN 14348 : - Mycobacterium terrae 0,5 % 15 min. EN 14348 : -

Mycobacterium avium 0,5 % 15 min.

FUNGICID EN 1275 Candida albicans Aspergillus niger 0,5 % 5 min EN 13697 Candida albicans Aspergillus niger 0,5 % 15 min.

VIRUCID

EN 14476- Enterovirus Polio 2 % 15 min, 1 % 30 min, 0,5 % 60 min

EN 14476 Adenovirus 2 % 15 min, 1 % si 0,5 % 30 min Rotavirus, Norovirus, Vaccinia Virus – 0,5% 15 min

EN 14476- BVDV (HCV)- PRV (HBV) 0,5% 10 min

SPORICID

EN 13697 Clostridium Difficile 0,5 % 15 min

EN 13704 Bacillus subtilis- 0,5 % 15 min

EN 13704 Clostridium difficile 0,5% 60 min

ANIOS OXY'FLOOR

Mod de utilizare :
Dezinfectia de nivel inalt a suprafetelor prin pulverizare

DEZINFECTIA PRIN PULVERIZARE A SUPRAFETELOR (PE CALE AERIANA)



Curatati in prealabil suprafetele cu un detergent dezinfectant



Personalul dezinfectant sa poarte echipament corespunzator (halat masca manusi)



Se recomanda inceperea dezinfectiei cu suprafetele verticale, apoi cu mobilierul. Pulverizati uniform pana la formarea unui film antimicrobian fara a provoca scurgerea dezinfectantului pe perete (de la o distanta de aproximativ 50 de cm.) sau pana se obtine ceata dezinfectanta in cazul in care aparatura de difuzare a solutiei permite acest lucru.



Lasati incaperea inchisa pentru timpul de actiune al solutiei. Aerisiti bine incaperea timp de 15 – 30 de minute. Este de preferat sa se mareasca timpul de contact al substantei si sa se aeriseasca inainte de reutilizarea incaperii.