

ȘERVEȚELE CU ALCOOL PENTRU DEZINFECȚIA RAPIDĂ A SUPRAFEȚELOR

Incidin™ Alcohol Wipe

ȘERVEȚEL DEZINFECTANT GATA DE UTILIZARE, CU ACȚIUNE RAPIDĂ

Absența reziduurilor active, combinată cu un spectru larg de eficacitate cu timpi scurți de contact fac ca Incidin™ Alcohol Wipe să fie ideal pentru utilizarea în unitățile medicale, oferind rezultate de dezinfectie și niveluri de conformitate obligatorii pentru a limita răspândirea agenților patogeni în mediul medical.

Incidin™ Alcohol Wipe asigură:

- Spectru larg de eficacitate inclusiv împotriva norovirusului, combinat cu timpi scurți de contact
- Declarații de eficacitate confirmate utilizând lichid extras din șervețel (adică eficacitatea este asigurată pentru lichidul eliberat din șervețel)
- Materialul șervețelului de înaltă calitate pentru aplicare eficientă
- Compatibilitate excelentă cu materialele pe suprafețele rezistente la alcool
- Fără coloranți și fără parfum



Incidin™ Alcohol Wipe

Șervețel dezinfectant gata de utilizare, cu acțiune rapidă

BENEFICII INCIDIN™ ALCOHOL WIPES

Spectru larg de eficacitate inclusiv împotriva norovirusului cu timpi

scurți de contact: Eficacitate extinsă care permite utilizarea în rutina zilnică și în focare, combinată cu timpi scurți de contact, asigurând astfel o dezinfecție rapidă. Eficacitatea pe suprafețe este confirmată pentru lichidul eliberat din șervețel.

Ușor de utilizat: șervețele cu alcool convenabile pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor, nu necesită pregătire, disponibile în format de pachete personalizate.

Compatibilitate extinsă a materialelor: compatibilitate excelentă a materialelor pe suprafețele rezistente la alcool din unitățile medicale.

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE

EFICACITATE	TIMP DE CONTACT
Bactericid conform EN 13727 / EN 16615	1 min*/**
Levuricid conform EN 13624 / EN 16615	1 min*/**
Tuberculocid/Micobactericid conform EN 14348 / EN 16615 (metoda)	1 min*/**
Virucid cu spectru limitat conform EN 14476	5 min*/**
Eficace împotriva virusurilor încapsulate conform EN 14476	30 sec*/**
Eficace împotriva Rotavirus conform EN 14476	30 sec**

* Condiții de murdărie ** Condiții de curățenie 10/2022

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ

PRODUS	UNITATE DE AMBALARE	COD DE COMANDĂ
Incidin™ Alcohol Wipe	Flowpack 6 x 100 șervețele (20x20 cm)	3093900

INDICAȚII



Dispozitiv medical: șervețel dezinfectant gata de utilizare cu acțiune rapidă pentru dispozitivele medicale neinvazive.

Produs biocid: pentru suprafețe generale (PT2).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Șervețel gata de utilizare.

Luați un singur șervețel. Ștergeți bine suprafața, asigurând contactul cu întreaga suprafață și lăsați să se usuce. Nu reutilizați șervețelele: dezinfecta nu mai poate fi garantată. Respectați condițiile și timpul de contact indicate pentru acțiunea antimicrobiană cerută. Închideți capacul după utilizare. Verificați compatibilitatea suprafețelor sensibile la alcool înainte de utilizare.

Dispozitiv medical: consultați instrucțiunile de utilizare ale producătorului pentru curățarea și dezinfecția dispozitivelor medicale. Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru.

Perioada de valabilitate după deschidere: 2 luni.

COMPOZIȚIE

100 g de soluție de impregnare conține: 35g Propan-2-ol (nr. CAS 67-63-0), 25g Propan-1-ol (nr. CAS 71-23-8).

DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat în recipientul original între 0°C și 25°C într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

DISPOZITIV MEDICAL ȘI PRODUS BIOCID, UTILIZAȚI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta și informațiile despre produs.

NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL.

Informații locale:

ECOLAB GMBH - VIENA
SUCURSALA IAȘI,

Centrul de Afaceri IDEO Iași,
Șos. Pacurari nr. 138, Etaj 2,
700545, Iași, România,
Tel. +40 232-222 210



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™